


NovoFine® Autocover®



Ganz einfach und sicher

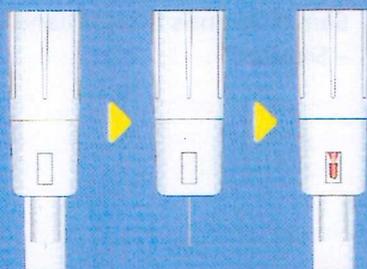

Bei NovoFine® Autocover® schiebt sich nach der Insulininjektion die Nadelabdeckung wieder über die Nadel und wird fest arretiert.

Minimiert das Risiko von Nadelstichverletzungen.

Die NovoFine® Autocover® Nadel ist direkt nach der Injektion durch eine Nadelabdeckung geschützt und minimiert so das Risiko von Nadelstichverletzungen.

Minimiert die Gefahr von Krankheitsübertragungen über die Nadel.

Wenn die Injektionsnadel aus der Haut herausgezogen wird, wird der Sicherheitsverschluss aktiviert. So wird eine versehentliche zweite Verwendung technisch ausgeschlossen.

Entwickelt, um die Angst vor der Nadel zu verringern.

Die Nadelabdeckung der NovoFine® Autocover® Injektionsnadel kann helfen, die Angst vor der Injektion zu vermindern.

NovoFine® Autocover® – und passende Insulin-Injektionsgeräte¹

NovoFine® Autocover®: die Sicherheits-Nadel, die Nadelstichverletzungen minimiert.

Bis zu 80 % der versehentlichen Blutkontakte werden durch Nadelstichverletzungen verursacht.² NovoFine® Autocover® wurde mit dem Ziel entwickelt, das Risiko von Nadelstichverletzungen für Beschäftigte im Gesundheitswesen zu minimieren.

NovoFine® Autocover®: getestet auf Kompatibilität mit gängigen Injektionsgeräten.

Die von Novo Nordisk entwickelte NovoFine® Autocover® wurde auf Kompatibilität mit zur Zeit gängigen Injektionsgeräten getestet und auf ordnungsgemäße Funktion geprüft.¹

Testmethodik¹

1. Montage und Demontage der Injektionsnadeln nach ISO 11608-2

2. Überprüfung Insulinfluss: Nachweis der Durchdringung der hinteren Nadel durch die Patrone mit Hilfe von Insulinflussprüfungen

3. Röntgen: Nachweis der Durchdringung des rückwärtigen Teils der Nadel durch den Gummistopfen der Insulinpatrone durch zweidimensionales Röntgen

Produktübersicht



NovoFine® Autocover® 8 mm 30 G
Injektionsnadeln
PZN: 0004400

Referenzen: 1. Data on file (241-RD-17.10.1-004). 2. Occupational Safety and Health Administration. How to Prevent Needlestick Injuries: Answers to Some Important Questions. 1999; 3161. <http://www.osha.gov>

Wenn Sie mehr wissen wollen:

www.novonordisk.de

www.diabetes.de



NovoFine® Autocover® passt auf folgende Injektionsgeräte von Novo Nordisk:

Wiederbefüllbare Pens

- NovoPen® 3
- NovoPen® 4

Vorgefüllte Pens

- FlexPen®
- InnoLet®
- Fertigpen für GLP-1 Analogon

NovoFine® Autocover® wurde mit den folgenden Injektionsgeräten auf ordnungsgemäße Funktion geprüft:¹

Wiederbefüllbare Pens

Berlin-Chemie AG

- BerliPen® 301
- BerliPen® areo
- BerliPen® areo 2

OWEN MUMFORD LIMITED, GB

- Autopen® Classic
- Autopen® 24

B. Braun Melsungen AG

- Omnican® Pen 31

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

- OptiPen® Pro 1
- OptiClik®
- TactiPen®

Eli Lilly and Company, US

- HumaPen® Luxura™
- HumaPen® Luxura™ HD
- HumaPen® Memoir™

Ypsomed GmbH

- Ypsopen®

Vorgefüllte Pens

Berlin-Chemie AG

- Fertigpen Berlin-Chemie

Eli Lilly and Company, US

- KwikPen®
- Lilly Fertigpen
- Fertigpen für GLP-1 Analogon

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

- SoloStar®

Hinweis: NovoFine®, Autocover®, NovoPen®, FlexPen® und InnoLet® sind eingetragene Marken der Novo Nordisk A/S, Dänemark. Alle übrigen genannten Marken sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

novofine® Autocover®

NovoFine® Autocover®



Die Sicherheits-Nadel.

Ganz einfach und sicher


- Schließt technisch eine versehentliche Zweitverwendung aus
- Minimiert das Risiko von Nadelstichverletzungen
- Minimiert die Gefahr von Krankheitsübertragungen über die Nadel




novofine®

NovoFine® Autocover®: ganz einfach und sicher


Bei NovoFine® Autocover® wird nach der Insulininjektion die Nadel in das Gehäuse zurückgezogen und fest arretiert.

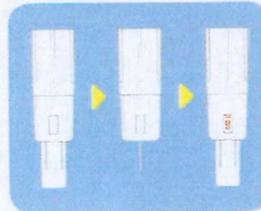


Vor der Injektion

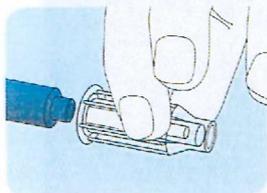

NovoFine® Autocover® auf den Insulin-Pen schrauben

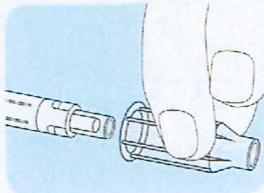


Schutzkappe abziehen

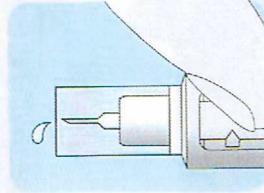


Insulinfluss überprüfen und Dosis einstellen


Die Injektion

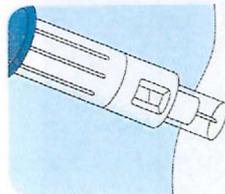

Führen Sie die Nadel in einem 90°-Winkel unter die Haut.

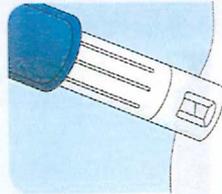

Die transparente Nadelabdeckung muss vollständig eingeschoben sein, so dass die Nadel komplett subkutan eingestochen ist. Injizieren Sie erst dann das Insulin. Belassen Sie die Nadel für mind. 6 Sekunden unter der Haut.

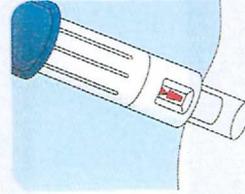

Die gebrauchte Nadel wird sofort automatisch zurückgezogen und bleibt in dieser Stellung blockiert. So wird eine versehentliche zweite Verwendung verhindert sowie das Risiko einer Stichverletzung und eines Blutkontaktes über die Nadel minimiert. Im seitlichen Sichtfenster wird rot signalisiert, dass die Nadel bereits verwendet wurde und entsorgt werden muss.

NovoFine® Autocover® 8mm 30G Injektionsnadeln PZN: 0004400

Service-Nummer:
0800 1115728

Novo Nordisk Pharma GmbH
Brücknerstraße 1
D-55127 Mainz
Deutschland

Wenn Sie mehr wissen wollen:
www.novonordisk.de
www.diabetes.de

